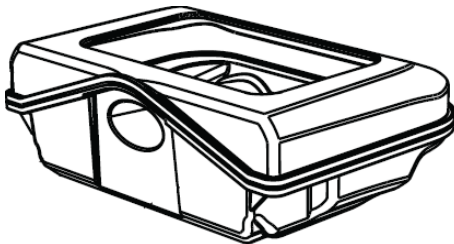


 Philips S.p.A. Healthcare - Respironics Viale Sarca, 235 20126 Milano	<u>SCHEDA</u> <u>DISPOSITIVI</u> <u>MEDICI</u>	CODICE: 1122520 Rev03 Data: 03/12/2019 Pagina 1 di 2
---	---	--

Nome prodotto	Camera di umidificazione per dispositivi DreamStation
Immagine	

Dettaglio codici	1122520 → Camera di umidificazione per dispositivi DreamStation		
	Codice		
	1122520		
Fabbricante	Respironics INC.	Paese di origine	USA
Anno di inizio Produzione	2015		
Anno inizio Commercializzazione	2016		
Mandatario in EU	Respironics Deutschland		
Periodo di garanzia produttore	24 mesi		
Periodo di garanzia fornitore	24 mesi		

D A T I T E C N I C I

Descrizione:

La camera di umidificazione 1122520 è l'accessorio che deve essere inserito all'interno dell'umidificatore dei dispositivi Philips piattaforma DreamStation.

Per maggiori informazioni consultare il manuale d'uso

ATTENZIONE

Gli articoli descritti in questa Scheda Tecnica non sono classificati Dispositivi Medici dal fabbricante. Pertanto, non può essergli attribuito né un codice CND né un codice RDM.

INFORMAZIONI SULLA MANUTENZIONE

Si garantisce la manutenzione per 5 anni successivi alla fine produzione del modello

Si garantisce la disponibilità di componenti di ricambio per 5 anni successivi alla fine produzione del modello

PROGRAMMA DI MANUTENZIONE PREVENTIVA CONSIGLIATO

Non sono previsti interventi di manutenzione preventiva ed ordinaria. Se la camera è danneggiata rivolgersi al distributore. Non sono previsti interventi di manutenzione preventiva ed ordinaria. Se la camera è danneggiata rivolgersi al distributore. Pulizia: Il lavaggio a mano può essere eseguito giornalmente in una soluzione di acqua tiepida e detergente neutro. Il

Philips S.p.A.
Healthcare – Respironics
sede operativa e legale
Viale Sarca, 235 – 20126 Milano
Tel: 02.38593000

Cap. Soc.: Euro 50.000.000,00 i.v.
Registro imprese Milano, Codice Fiscale e
P.IVA 00856750153
R.E.A. Milano: n. 88001
Direzione e coordinamento : Koninklijke Philips Electronics N.V.
Registro produttori AEE n. IT08010000000099

 Philips S.p.A. Healthcare - Respironics Viale Sarca, 235 20126 Milano	<u>SCHEDA</u> <u>DISPOSITIVI</u> <u>MEDICI</u>	CODICE: 1122520 Rev03 Data: 03/12/2019 Pagina 2 di 2
---	---	--

lavaggio in lavastoviglie può essere eseguito una volta alla settimana.

Per la tipologia dell'accessorio, non è prevista alcuna proposta di contratto di manutenzione

CARATTERISTICHE E DATI TECNICI PER L'INSTALLAZIONE	
Materie prime utilizzate:	PVC Raccordi di connessione in silicone Guarnizione di tenuta in silicone Latex free
Tecniche di lavorazione	INIEZIONE/STAMPAGGIO
Confezionamento:	Riutilizzabile – clinicamente pulito
Imballaggio:	Confezione da 1 pz.
Capacità serbatoio acqua	325 ml al livello raccomandato
Piastra di riscaldamento	Max 65°C

Infrastrutture particolari necessarie per l'installazione: NESSUNA

Ulteriori esigenze tecniche per l'installazione, il funzionamento corretto e l'uso sicuro dell'apparecchiatura: CONSULTARE IL MANUALE D'USO

LIMITAZIONI D'USO
L'APPARECCHIO CON UMIDIFICAZIONE DEVE ESSERE UTILIZZATO ESCLUSIVAMENTE DA PERSONALE SANITARIO SOTTO LA SUPERVISIONE DI UN MEDICO E SECONDO LE MODALITA' PREVISTE DAI MANUALI D'ISTRUZIONE. NEI CASI DI UTILIZZO EXTRA-OSPEDALIERO, IL PAZIENTE DEVE ATTENERSI STRETTAMENTE ALLE ISTRUZIONI IMPARTITE DAL MEDICO CURANTE E IN CONFORMITA' A QUANTO PREVISTO DAL MANUALE D'USO

PRECAUZIONI DI UTILIZZO E CONTROINDICAZIONI
PRECAUZIONI • Utilizzare sempre camere di umidificazione Philips Respironics • Lasciare raffreddare la piastra di riscaldamento dell'umidificatore e l'acqua in esso contenuta per almeno 15 minuti prima di rimuovere il serbatoio dell'acqua. Se si tocca la piastra di riscaldamento, l'acqua riscaldata o il serbatoio ci si potrebbe scottare. • Non riempire la camera quando è all'interno dell'umidificatore. • Quando si versa l'acqua prestare attenzione a non versare l'acqua sull'umidificatore o sul dispositivo. • Non riempire la camera di umidificazione oltre la linea di riempimento massimo , poiché ciò potrebbe danneggiare l'umidificatore o il dispositivo terapeutico. • Prima di rimuovere il serbatoio dell'acqua accertarsi che lo sportello dell'umidificatore sia in posizione aperta. • Utilizzare solo acqua preferibilmente distillata temperatura ambiente. Non aggiungere all'acqua né prodotti chimici né additivi, per evitare di irritare le vie aeree del paziente o danneggiare la camera di umidificazione. • Prima di pulire la camera di umidificazione rimuoverla sempre dal dispositivo. • Si consiglia di svuotare giornalmente il serbatoio per evitare la formazione di muffe e la proliferazione batterica.

SMALTIMENTO
Raccolta separata per le apparecchiature elettriche ed elettroniche ai sensi della Direttiva CE 2012/19/EU. Smaltire il presente dispositivo in conformità alle norme vigenti.

Philips S.p.A.
Healthcare – Respironics
sede operativa e legale
Viale Sarca, 235 – 20126 Milano
Tel: 02.38593000

Cap. Soc.: Euro 50.000.000,00 i.v.
Registro imprese Milano, Codice Fiscale e
P.IVA 00856750153
R.E.A. Milano: n. 88001
Direzione e coordinamento : Koninklijke Philips Electronics N.V.
Registro produttori AEE n. IT08010000000099