

# Manutenzione facile e rapida- il vantaggio Inogen.

- 14 Se si utilizza l'applicazione Inogen Connect, andare alla schermata Advanced (Avanzate), quindi alla schermata Additional Information (Informazioni aggiuntive) e fare clic sul pulsante Column Reset (Reset colonne).

Il fornitore dell'apparecchiatura:

Il medico:



326 Bollay Drive,  
Goleta, CA 93117  
1-877-4-INOGEN (Numero verde)  
1-877-446-6436 (Numero verde)  
1-805-562-0515 (Internazionale)  
info@inogen.net  
www.inogen.com

96-09240-03-01 A


**INOGEN ONE<sup>®</sup> G5**

Guida alla sostituzione delle colonnine



# INOGEN ONE® G5

Per sostituire le colonnine di Inogen One® G5, innanzitutto:


- 1 Spegnere il concentratore Inogen One® G5 premendo il pulsante di accensione  per arrestare il dispositivo.
- 2 Rimuovere il concentratore Inogen One® G5 dalla custodia di trasporto (se in dotazione).




Rimuovere la batteria dal concentratore Inogen One® G5.




Collocare il concentratore Inogen One® G5 su un lato in modo che sia visibile la parte inferiore. Il gruppo colonnine metalliche è visibile su un lato del dispositivo.

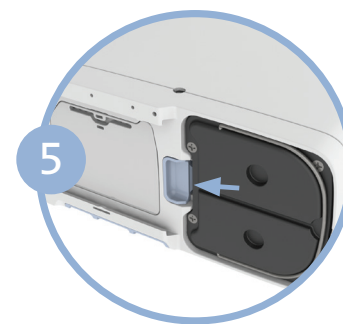

Sbloccare il gruppo colonnine disinserendo il pulsante di blocco dalle colonnine.

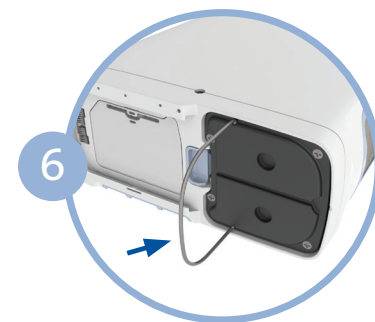

Tenendo disinserito il pulsante, far scorrere il gruppo colonnine all'esterno del dispositivo tirando l'impugnatura delle colonnine.

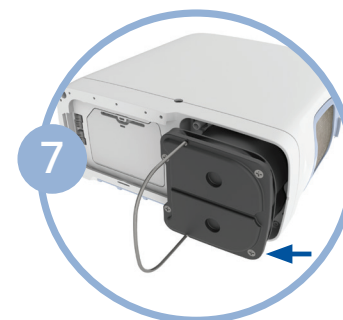

Rimuovere completamente le colonnine da Inogen One® G5. Entrambe le colonnine vengono rimosse come pezzo unico.



Rimuovere le coperture antipolvere dal nuovo gruppo colonnine. Accertarsi che non ci siano polvere o detriti dove si trovavano le coperture.



Inserire il gruppo colonnine nel concentratore Inogen One® G5. Non lasciare esposte le estremità delle colonnine; il gruppo colonnine dev'essere inserito nell'Inogen One® G5 non appena rimosse le coperture antipolvere.



Spingere il gruppo colonnine nel dispositivo in modo che le colonnine siano completamente collocate nel concentratore Inogen One® G5. Il pulsante di blocco a molla deve tornare completamente alla posizione inserita.





Collegare il cavo di alimentazione ca a Inogen One® G5 e collegare il cavo di alimentazione ca a una presa elettrica. Non accendere il concentratore Inogen One® G5.

## NOTA

Le istruzioni di sostituzione delle colonnine devono essere usate solamente in caso di necessità di un intervento di manutenzione e non sono da utilizzarsi a fini pratici.



Premere il pulsante della campana/di allarme  una volta e lo schermo visualizzerà "sieve reset success" (reset filtro completato). Premere il pulsante di accensione  per attivare Inogen One® G5, e utilizzare normalmente.



Premere e tenere premuti i pulsanti più (+) e (-) meno per 5 secondi. Lo schermo visualizzerà il messaggio "sieve reset" (reset filtro). Rilasciare i pulsanti una volta visualizzato il messaggio sullo schermo.

CONTINUA SUL RETRO →