



# Full Face Mask (F5AS)

## Bedienungsanleitung



### Full Face Mask (F5AS)

Vielen Dank, dass Sie sich für die BMC Full Face Mask (F5AS) entschieden haben. Die Maske ist komfortabel, flexibel und geräuscharm. Sie wurde entwickelt, um den Kontakt mit Ihrem Gesicht zu minimieren und um sicherzustellen, dass Sie sich während der Therapie wohl fühlen. In dieser Bedienungsanleitung finden Sie die Informationen, die Sie für den korrekten Gebrauch Ihrer Maske benötigen. Die Full Face Mask (F5AS) und das Zubehör sind nicht aus Naturgummilatex oder DEHP hergestellt.

### Verwendungszweck

Die Full Face Mask (F5AS) ist als Schnittstelle für Patienten gedacht, denen eine CPAP- oder Bilevel-Therapie verschrieben wurde.

Die Full Face Mask (F5AS) wird:

- angewendet bei erwachsenen Patienten (> 66 lb / 30 kg), bei denen ein positiver Atemwegsdruck verordnet wurde.
- bestimmt für die Wiederverwendung bei einem Patienten im Wohnumfeld und für die Wiederverwendung bei unterschiedlichen Patienten im Krankenhaus oder im institutionellen Umfeld.

**VORSICHT:** In den USA darf dieses Gerät nach geltendem Recht nur von einem Arzt oder auf dessen Anordnung verkauft werden.

### Kontraindikationen

Bei den folgenden Symptomen darf die Maske nicht oder nur mit besonderer Vorsicht eingesetzt werden:


- Gesichtsdeformitäten.
- Verletzte Gesichtshaut im Kontaktbereich der Maske.

### Vor der Verwendung der Maske

#### ! WARNUNGEN

- Die Entlüftungsöffnungen müssen unbeschädigt und frei von Verstopfungen bleiben.
- Die Maske ist nicht für Patienten geeignet, die eine lebenserhaltende Beatmung benötigen.
- Diese Maske sollte nur mit CPAP- oder Bilevel-Geräten verwendet werden, die von einem Arzt oder Atemtherapeuten empfohlen werden.
- Die Maske sollte nicht verwendet werden, sofern das Gerät eingeschaltet ist. Nachdem die Maske aufgesetzt wurde, stellen Sie sicher, dass das Gerät Luft ausbläst.
- Erläuterung des Warnhinweises: CPAP- und Bilevel-Geräte sind für die Verwendung mit speziellen Masken (oder Anschlüssen) vorgesehen, welche Entlüftungsöffnungen haben, um einen kontinuierlichen Luftaustausch zu gewährleisten Wenn das Therapiegerät eingeschaltet ist und ordnungsgemäß funktioniert, spült neue Luft aus dem Gerät die ausgetatmete Luft durch die Öffnungen der Maske aus. Wenn das Gerät jedoch nicht in Betrieb ist, wird nicht genügend frische Luft durch die Maske geleitet und die ausgetatmete Luft wird erneut eingeatmet. kann. Das erneute Einatmen der ausgetatmeten Luft über mehrere Minuten kann unter Umständen zur Sauerstoffunterversorgung und gesundheitlicher Schädigung führen. Dies gilt für die meisten unterschiedlichen Therapiegeräte.
- Bei niedrigen CPAP-Drücken ist der Durchfluss durch die Ausatemöffnung möglicherweise nicht ausreichend, um das gesamte ausgetatmete Gas aus dem Schlauch zu entfernen. Es kann zur Rückatmung kommen.
- Um das Risiko eines Erbrochens während des Schlafs zu minimieren, sollte der Patient vor der Verwendung der Maske drei Stunden lang weder essen noch trinken. Diese Maske wird nicht empfohlen, wenn der Patient ein verschreibungspflichtiges Medikament einnimmt, das Erbrechen verursachen kann.
- Verwenden Sie die Maske nicht ohne eingesetztes Nicht-Rückatemventil.
- Nicht anwendbar für Benutzer mit Silikonallergie.
- Diese Maske darf nicht bei Patienten angewendet werden, die nicht kooperieren, die eine Bewusstseinsstörung aufweisen, reaktionslos sind, oder die Maske nicht selbst entfernen können.
- Die Anwendung der Maske kann Schmerzen in den Zähnen, im Zahnfleisch oder im Kiefer verursachen oder bestehende Zahnprobleme verschlimmern. Sollten diese Beschwerden auftreten, wenden Sie sich an Ihren Arzt.
- Wenn der Patient nicht in der Lage ist, die Maske selbst abzunehmen, sollte die Maske unter fachkundiger Aufsicht verwendet werden.
- Befolgen Sie alle Vorsichtsmaßnahmen, wenn Sie zusätzlichen Sauerstoff verwenden.
- Der Sauerstofffluss muss abgeschaltet werden, wenn dasÜberdrucktherapiegerät nicht in Betrieb ist, damit der nicht verwendete Sauerstoff sich nicht im Gehäuse ansammelt und dadurch die Brandgefahr erhöht.
- Sauerstoff unterstützt die Verbrennung. Der Sauerstoff darf nicht beim Rauchen oder in einer offenen Flamme verwendet werden. Benutzen Sie den Sauerstoff nur in gut belüfteten Räumen.
- Bei einer festgelegten Flussrate des zusätzlichen Sauerstoffstroms variiert die eingeatmete Sauerstoffkonzentration abhängig von den Druckeinstellungen, dem Atemmuster des Patienten, der Maske, dem Anwendungsort und der Leckagerate.
- Ihr Arzt kann anhand der technischen Daten der Maske prüfen, ob sie mit dem Atemtherapiegeräte und dem Sauerstoffventil kompatibel ist. Wenn die Maske außerhalb der technischen Spezifikationen oder mit einem inkompatiblen Gerät verwendet wird, wird die Abdichtung und der Tragekomfort der Maske möglicherweise nicht wirken; dann kann kein optimales Therapieergebnis erzielt werden. Darüber hinaus kann ein Leck oder eine Variation der Leckagerate die Funktion des Luftflusses des Therapiegerätes beeinträchtigen.
- Unterbrechen Sie die Anwendung der Maske und wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Schlaftherapeuten, wenn Sie nachteilige Reaktionen bei Verwendung der Maske bemerken.
- Weitere Informationen zu Einstellungen und Betriebsinformationen finden Sie im Handbuch Ihres Atemtherapiegerätes.
- Entfernen Sie alle Verpackungsmaterialien, bevor Sie die Maske verwenden.
- Die hier gezeigten Bilder sind nur Richtwerte. Wenn es eine Inkonsistenz zwischen dem Bild und dem tatsächlichen Produkt gibt, gilt das tatsächliche Produkt.
- Alle schwerwiegenden Vorfälle, die im Zusammenhang mit diesem Gerät auftreten, sollten BMC und der zuständigen Behörde Ihres Landes gemeldet werden.
- Die Häufigkeit der Reinigung, die Reinigungsmethoden oder die Verwendung von Reinigungsmitteln, die nicht in den Begleiddokumenten angegeben sind, oder die Überschreitung der Anzahl der Verarbeitungszyklen können sich nachteilig auf die Maske auswirken und somit die Sicherheit oder die Qualität der Therapie beeinträchtigen.

### Bauteile der Full Face Mask (F5AS)

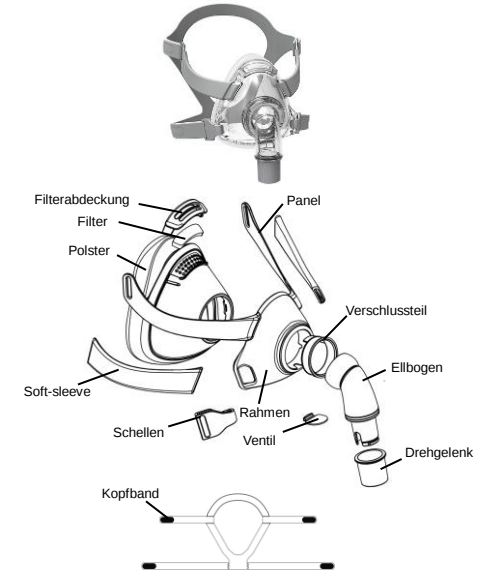

Anmerkungen: Die Rahmenbaugruppe besteht aus Rahmen, Panel, Soft-sleeve, Verschlusssteil und Ellbogen baugruppe. Die Ellbogen baugruppe besteht aus Ellbogen und Ventil. Die Filterbaugruppe besteht aus Filter und Filterabdeckung.

### Bauteile der Full Face Mask (F5AS)


### Anlegen der Maske




### Demontage der Maske

#### Hinweise:

- Das Ellbogen baugruppe, die panel und der Verschlusssteil können nicht von der Rahmenanordnung demontiert werden.
- Das Ellbogen kann nicht zerlegt werden.
- Das Ventil kann nicht zerlegt werden, oder es können Schäden auftreten, und die erneute Installation wird schwieriger.

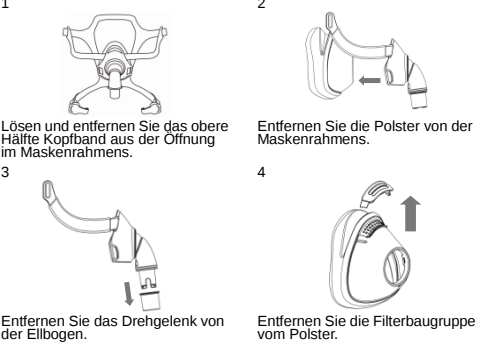

### Zusammensetzen der Maske

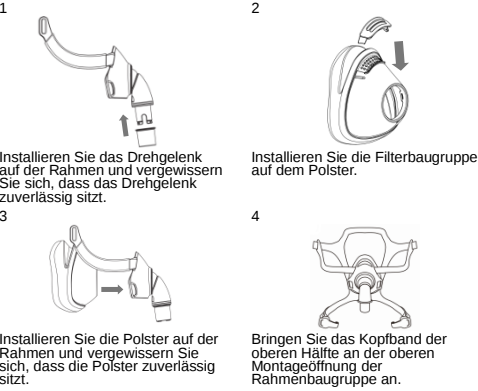

### Reinigung der Maske zu Hause

#### Anmerkungen:

- Maske und Kopfband sind immer per Hand zu reinigen.
- Das Ellbogen baugruppe, die panel und der Verschlusssteil können nicht von der Rahmenanordnung demontiert werden zum reinigen.
- Die Ellbogen und der Ventil können nicht aus der Ellbogen baugruppe demontiert werden zum reinigen.
- Die Filterbaugruppe sollte mindestens einmal pro Woche gewaschen werden. Trocknen Sie es vor der Wiederverwendung vollständig. Ersetzen Sie es nach 30 Tagen oder 8-maliger Reinigungen einfach durch ein neues.
- Waschen Sie die Filterbaugruppe vorsichtig, um Beschädigungen zu vermeiden. Weichen Sie es nicht länger als 10 Minuten ein.

#### ! VORSICHT

- Verwenden Sie keine Lösungen, die Bleichmittel, Chlor, Alkohol, Aromen, Feuchtigkeitscremes, antibakterielle Mittel oder Duftöle enthalten, um die Teile des Systems oder der Luftschläuche zu reinigen. Diese Lösungen können Schäden verursachen und die Lebensdauer des Produkts verkürzen.
- Wenn Teile des Systems oder der Schläuche direkt der Sonnenstrahlung oder Hitze ausgesetzt werden, kann dies zu Schäden führen.
- Sichtbare Zeichen für die Produktinspektion: Sollte eine Maskenkomponente sichtbare Beschädigungen aufweisen (Risse, Sprünge, Risse usw.), sollte die Komponente entsorgt und ersetzt werden.
- Der Austausch von Teilen muss von professionellem Servicepersonal durchgeführt werden.

### Vorbereitung vor der Reinigung

- Vorbereitungswerkzeuge: Bürste mit weichen Borsten, Wasser in Trinkqualität (fünf liter pro maske), mildes

Flüssigreinigungsmittel (z. B. mit 1% verdünntes Alconox).  
2. Entfernen Sie die Maske: Siehe Kapitel Demontageanleitung.

### Täglich, nach jeder Nutzung

- Demontieren Sie die Maskenteile entsprechend der Demontageanleitung.
- Tauchen Sie die Teile 10 Minuten lang in eine Lösung aus mildem Flüssigwaschmittel (z. B. Alconox, auf 1% verdünnt) und Wasser in Trinkqualität (25°C bis 35°C).
- Während des Eintauchens reinigen Sie jedes Bauteil 1 Minute lang mit einer Bürste mit weichen Borsten. Achten Sie dabei besonders auf alle Ritzen und Hohlräume.
- Schütteln Sie die Teile zweimal kräftig in Wasser in Trinkqualität. Jeweils 5 Liter Wasser pro Maske.
- Lassen Sie die Teile an der Luft trocknen und vermeiden Sie direkte Sonneneinstrahlung.
- Wenn alle Teile trocken sind, bauen Sie die Maske gemäß der Montageanleitung wieder zusammen.

#### Hinweise:

- Bei täglicher Reinigung oder nach jedem Gebrauch kann die Maske bis zu 365 Mal gewaschen werden.

### Wöchentlich

Waschen Sie das Kopfband und seine Bestandteile 10 Minuten lang von Hand in einer Lösung aus mildem Flüssigwaschmittel (z. B. Alconox, auf 1% verdünnt) und Wasser in Trinkqualität (25°C bis 35°C). Spülen Sie das Kopfband und seine Bestandteile gut mit Wasser von Trinkqualität ab und lassen Sie es an der Luft trocknen, ohne direkte Sonneneinstrahlung.

#### Hinweise:

- Bei wöchentlicher Reinigung kann das Kopfband bis zu 52 Mal gewaschen werden.

### Filtereinsatz

Die Lebensdauer des Baumwollfilters beträgt 30 Tage oder nach 8-maliger Reinigung. Vorbereitung vor der Reinigung  
Vorbereitungswerkzeuge: Bürste mit weichen Borsten, Wasser in Trinkqualität (fünf liter pro maske), mildes Flüssigreinigungsmittel (z. B. mit 1% verdünntes Alconox), Entfernen Sie die Maske: Siehe Kapitel Demontageanleitung  
1. Tauchen Sie die Komponenten 10 Minuten lang in ein mildes Flüssigreinigungsmittel (z. B. Alconox, 1%ig verdünnt) ein, das mit Wasser in Trinkqualität (ca. 30°C) verdünnt wurde.

- Reinigen Sie die Entlüftung (ohne Filter) mit einer weichen Bürste, solange sie in die Lösung eingetaucht ist.
- Spülen Sie alle Bestandteile gut mit Wasser von Trinkqualität ab und lassen Sie diese an der Luft trocknen, ohne direkte Sonneneinstrahlung.
- Sobald alle Teile trocken sind, bauen Sie sie gemäß der Montageanleitung wieder zusammen.

#### Hinweise:

- Die Filtereinheit kann bis zu 8 Mal gewaschen werden.

### Wiederaufbereitung der Maske bei Patientenwechsel

Diese Maske sollte bei jedem Patientenwechsel erneut aufbereitet werden. Anweisungen zur Reinigung und Desinfektion finden Sie auf der BMC-Website unter [www.bmc-medical.com](http://www.bmc-medical.com). Wenn Sie keinen Internetzugang haben, wenden Sie sich bitte an Ihren BMC-Vertreter.

#### Hinweise:

- Die maximale Anzahl der Desinfektionsvorgänge beträgt 20.

### Fehlerbehebung

| Problem                                                         | Mögliche Gründe                                               | Mögliche Lösungen                                                                                                                            |
|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Die Maske dichtet nicht richtig, drückt oder sitzt unbehaglich. | Die Maske ist nicht korrekt montiert.                         | Lesen Sie die Anweisung "Anlegen der Maske" sorgfältig durch und prüfen Sie die Einstellung des Kopfbandes.                                  |
|                                                                 | Die Größe der Maske ist nicht richtig.                        | Fragen Sie Ihren Arzt oder Therapeuten.                                                                                                      |
| Die Maske läuft um das Gesicht herum aus.                       | Das Polster ist auf dem Polster rahmen Falsche Position.      | Überprüfen Sie das Einsetzen des Polster und setzen Sie es gemäß der Anweisungen im Abschnitt "Zusammensetzen der Maske" wieder richtig ein. |
|                                                                 | Die Größe der Maske ist nicht richtig.                        | Fragen Sie Ihren Arzt oder Therapeuten.                                                                                                      |
| Die Maske ist zu geräuschartig.                                 | Die Luftaustlassöffnungen sind ganz oder teilweise blockiert. | Reinigen Sie die Maske entsprechend des Abschnitts "Reinigung der Maske zu Hause".                                                           |

### Vorgesehener Klinischer Vorteil

- Verbesserung der Schlafqualität von Patienten.
- Verbesserung der Therapietreue von Patienten.

### Aufbewahrung

Vergewissern Sie sich, dass die Maske sauber und trocken ist, bevor Sie sie lagern. Lagern Sie die Maske an einem trockenen Ort geschützt vor direkter Sonneneinstrahlung.

### Entsorgung

Die Maske enthält keine gefährlichen Schadstoffe und kann über den normalen Hausmüll entsorgt werden. Bei Patienten mit übertragbaren Krankheiten muss das Produkt als medizinischer Abfall entsorgt werden, da es ansonsten zur Verbreitung von Krankheiten kommen kann.


### Lebensdauer

Die Lebensdauer der Maske hängt von der Intensität der Nutzung, der Wartung und den Umgebungsbedingungen ab, unter denen die Maske verwendet oder gelagert wird. Da das Maskensystem und seine Komponenten einen modularen Aufbau haben, wird dem Benutzer empfohlen, es regelmäßig zu warten und zu überprüfen und bei Bedarf oder gemäß den "Visuellen Kriterien für die Produktinspektion" im Abschnitt "Reinigung der Maske zu Hause" in dieser Gebrauchsanweisung das Maskensystem oder einzelne Komponenten auszutauschen. Die Maske sollte innerhalb von 12 Monaten nach dem ersten Gebrauch ausgetauscht werden.

### Technische Daten

#### F5AS AUSPUFFDURCHFLUSS

Diese Full Face Mask (F5AS) hat eine einzigartige Filterbaugruppe, die zur Diffusion von Luft ausgelegt ist. Diese Maske kann mit oder ohne Filterbaugruppe verwendet werden.

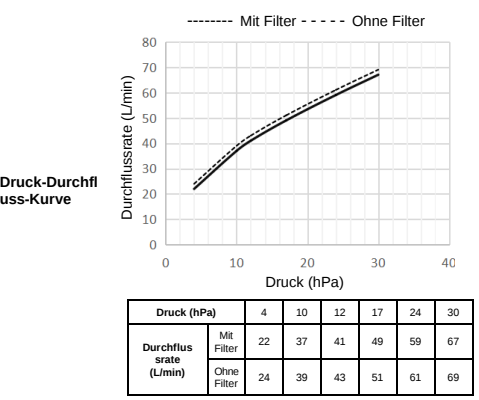

|                         |                                                                                                                                                       |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Information zum Totraum | Totraum ist das gesamte Volumen der Maske bis zum Drehgelenk. Der Totraum der Maske variiert je nach Polstergröße, beträgt jedoch weniger als 225 mL. |
| Therapiedruck           | 4 bis 30 hPa                                                                                                                                          |
| Widerstand              | Druckabfall gemessen (Durchschnitt für 3 Größen) bei 50 L/min: 0,15 hPa, bei 100 L/min:0,5 hPa                                                        |

|                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Inspiratorischer und expiratorischer Widerstand               | Der Inspirationswiderstand der Maske (in Kombination mit dem) beträgt 1,8 hPa bei 50 l/min. Der Expirationswiderstand der Maske (in Kombination mit dem) beträgt 2,0 hPa bei 50 l/min.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Anti-Asphyxia-Ventil offen zu atmosphärische m Druck.         | ≤ 2,8 hPa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Anti-Asphyxia-Ventil gegen atmosphärischen Druck geschlossen. | ≤ 2,8 hPa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Geräuschpegel                                                 | GERÄUSCHEMISSIONSWERTE gemäß ISO 4871. Der A-bewertete Schalleistungspegel der Maske mit Filter beträgt 25 dBA, mit einer Unsicherheit von 3 dBA. Der A-bewertete Schalldruckpegel der Maske mit Filter in einem Abstand von 1 m beträgt 17 dBA, mit einer Unsicherheit von 3 dBA. Der A-bewertete Schalleistungspegel der Maske ohne Filter beträgt 28 dBA, mit einer Unsicherheit von 3 dBA. Der A-bewertete Schalldruckpegel der Maske ohne Filter in einem Abstand von 1 m beträgt 20 dBA, mit einer Unsicherheit von 3 dBA. |
|                                                               | Umgebungstemperatur für den Betrieb: +5°C bis +40°C (41°F bis 104°F)<br>Luftfeuchtigkeit für den Betrieb: 0% bis 93% relativ<br>Feuchtigkeit nicht-Kondensierend<br>Lager- und Transporttemperatur: -20°C bis +55°C (-4°F bis 131°F)<br>Lager und Transport Feuchtigkeit: 0% bis 93% relativ<br>Feuchtigkeit nicht-Kondensierend                                                                                                                                                                                                 |
| Umgebungsbedingungen                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Herstellungsdatum                                             | Siehe Produktetikett                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

### Zeichen

### System und Verpackung

|  |                                                         |  |                                           |
|--|---------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------|
|  | Vorsicht                                                |  | Haltbarkeitsdatum                         |
|  | Zugelassener Vertreter in der Europäischen Gemeinschaft |  | Nicht mit Naturkautschuklatex hergestellt |
|  | Chargennummer                                           |  | Importeur                                 |
|  | Katalognummer                                           |  | Modell-Nummer                             |
|  | Temperatur-Grenzwert                                    |  | Hergestellt in China                      |
|  | Begrenzung der Luftfeuchtigkeit                         |  | Medizinisches Gerät                       |
|  | Hersteller                                              |  | Eindeutige Geräteknennung                 |

### Eingeschränkte Garantie

Wir garantieren, dass die Full Face Mask (F5AS), einschließlich der Rahmenbaugruppe, Polster, Kopfband, Drehgelenk und der weiteren Einheiten eine Mindesthaltbarkeit von 90 Tagen haben (ab Verkauf). Bei Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Fachhändler. Die Maske ist mehrfach verwendbar und kann, bei täglicher

**HERSTELLER:**  
**BMC MEDICAL CO., LTD.**  
Room 110 Turn A FengyuBuilding, No. 115 Fucheng Road, Haidian, 100036 Beijing, Volksrepublik China  
URL: [en.bmc-medical.com](http://en.bmc-medical.com)  
E-mail: [intl@bmc-medical.com](mailto:intl@bmc-medical.com)  
Tel: +86-10-51663880  
Fax: +86-10-51663880 Ext. 810

**BEVOLLMÄCHTIGTER EU VERTRETER:**  
**Shanghai International Holding Corp. GmbH (Europe)**  
Eiffestraße 80, 20537 Hamburg, Germany  
Tel: 0049-40-2513175  
Fax: 0049-40-255726



# Full Face Mask (F5AS)

## Manuale d'uso



### Full Face Mask (F5AS)

Grazie per aver scelto la Full Face Mask (F5AS) di BMC. La maschera è comoda, flessibile e silenziosa. È stata progettata per ridurre al minimo il contatto con il viso, assicurando così che il paziente si senta a proprio agio durante la terapia. Questo manuale fornisce le informazioni necessarie per il corretto utilizzo della maschera. La maschera e gli accessori non sono realizzati in lattice di gomma naturale o DEHP.

### Destinazione d'Uso

La Full Face Mask (F5AS) ha lo scopo di fornire un'interfaccia ai pazienti cui è stata prescritta una terapia CPAP o bilevel.

La Full Face Mask (F5AS):

- viene utilizzata su pazienti adulti (> 66 lb / 30 kg) ai quali è stata prescritta la terapia ventilatoria a pressione positiva.
- è destinata al riutilizzo per un singolo paziente in ambiente domestico e per più pazienti in ambiente ospedaliero.

**ATTENZIONE:** Negli Stati Uniti la legge federale limita la vendita di questo dispositivo a un medico o su sua prescrizione.

### Controindicazione

Questa maschera deve essere usata con cautela per pazienti con le condizioni seguenti:


- Deformità facciale.
- Faccia inferita ha il contatto con la maschera durante l'utilizzo.

### Prima di Utilizzare la Maschera

#### ! AVVISI

- I fori di sfato devono essere mantenuti integri e liberi da ostruzioni.
- La maschera non è adatta a pazienti che necessitano di ventilazione a sostegno della vita.
- Questa maschera va usata solo con CPAP o dispositivi bilivello raccomandati da un medico o terapeuta respiratorio.
- La maschera non deve essere utilizzata se il dispositivo non è acceso. Una volta montata la maschera, assicurarsi che il dispositivo stia soffiando aria.
- Spiegazione dell'avviso: I sistemi CPAP o BILEVEL sono destinati ad essere utilizzati con speciali maschere dotate di fori di esalazione (porta di espirazione). Quando la macchina CPAP o BILEVEL è accesa e funziona correttamente, la nuova aria introdotta dalla macchina CPAP o BILEVEL permette la fuoriuscita dell'aria espirata dal paziente attraverso la porta di espirazione della maschera collegata. Tuttavia, quando la macchina CPAP o BILEVEL non è in funzione, attraverso la maschera non sarà fornita sufficiente aria fresca, e l'aria espirata sarà re-inalata. La re-inalazione di aria espirata per più di qualche minuto può, in alcuni casi, causare il soffocamento. Questo avviso vale per la maggior parte dei modelli di sistemi CPAP o BILEVEL.
- A basse pressioni di CPAP o BILEVEL il flusso attraverso la porta di espirazione può essere insufficiente per eliminare completamente dal tubo l'aria espirata. Si può verificare la re-inalazione di parte dell'aria esalata.
- Per ridurre al minimo il rischio di vomito durante il sonno, il paziente deve evitare di mangiare o di bere per tre ore prima di utilizzare la maschera. Questa maschera non è consigliata se il paziente sta assumendo un farmaco che può causare vomito.
- Non utilizzare la maschera senza valvola di non re-inalazione installata.
- Non applicabile per gli utenti di allergia al silicone.
- Questa maschera non deve essere utilizzata su pazienti che non collaborano, inibiti, che non rispondono o che non sono in grado di rimuovere la maschera.
- L'uso della maschera può provocare dolore ai denti, alle gengive o alla mascella oppure aggravare le condizioni dentali esistenti. Se si verificano queste condizioni, consultare il proprio medico.
- Quando il paziente non è in grado di rimuovere la maschera da solo, questa deve essere utilizzata sotto supervisione di personale qualificato.
- Seguire tutte le precauzioni del caso quando si ha l'utilizzo di ossigeno supplementare.
- Il flusso di ossigeno deve essere spento quando il generatore di flusso non è in funzione, in modo che l'ossigeno non utilizzato non si accumuli all'interno dell'involucro del generatore di flusso causando un potenziale rischio di incendio.
- L'ossigeno favorisce la combustione. Evitare di utilizzare ossigeno mentre si fuma o in presenza di fiamme libere. Utilizzare ossigeno solo in ambienti ben ventilati.
- Ad un flusso fisso di ossigeno supplementare, la concentrazione dell'ossigeno inspirato varia in base a: impostazioni di pressione, respirazione del paziente, maschera, punto di applicazione e tasso di perdita.
- Sono fornite le specifiche tecniche della maschera per il medico in modo che possa verificare se è compatibile con il dispositivo a pressione positiva. Se viene utilizzata oltre le specifiche tecniche, o utilizzata con dispositivi incompatibili, la tenuta ed il comfort della maschera non possono essere efficaci, la terapia ottimale non può essere raggiunta, e la perdita, o la variazione dell'assorbimento di perdita, può influenzare la stabilità della pressione erogata.
- Smettere di usare la Full Face Mask (F5AS) e consultare il medico o l'anestesista, in caso di QUALSIASI reazione avversa all'uso della maschera.
- Consultare il manuale del dispositivo a pressione positiva per i dettagli sulle impostazioni e le informazioni operative.
- Rimuovere tutti gli imballaggi prima di usare la maschera.
- Le immagini mostrate qui sono solo indicative. In caso di incoerenza tra l'immagine e il prodotto reale, il prodotto reale sarà soggetto a regolamentazione.
- Qualsiasi incidente grave che si verifichi in relazione a questo dispositivo deve essere segnalato a BMC e all'autorità competente del proprio paese.
- Frequenza della pulizia: metodi di pulizia o l'uso di detergenti diversi da quelli specificati nei documenti di accompagnamento oppure il superamento del numero di cicli di lavorazione possono avere un effetto negativo sulla maschera e di conseguenza sulla sicurezza o sulla qualità della terapia.

### Componenti della Full Face Mask (F5AS)

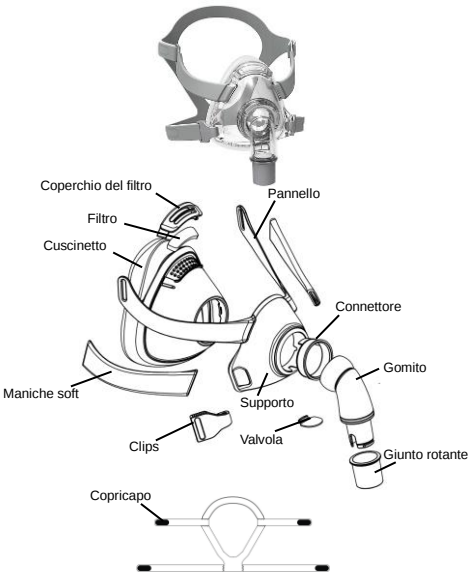

Note: L'assieme della struttura è composto da Supporto, Pannello, Maniche Soft, Connettore e L'assieme a gomito è composto da gomito e valvola. Il gruppo del filtro è composto da copricaprio del filtro.

Componenti della Full Face Mask (F5AS)

